


Pairing (Kopplung) von Komponenten

WICHTIG: Erst die Systemkomponenten und dann das System mit der Spezialisten-App pairen!

- 1 Oberschenkelmanschette mit Unterschenkelmanschette.
Pairing-Modus für den Stimulator aktivieren: Auf jedem Stimulator gleichzeitig die Plus- und die Minustaste drücken. Die Stimulator-Statusleuchte blinkt dann grün, gelb, rot.
- 2 Ggf. Fußsensor mit Stimulator der Unterschenkelmanschette pairen.
Pairing-Modus für den Fußsensor aktivieren: Für das Pairing des Fußsensors mit einem neuen Stimulator eine Batterie (CR2032) in den Fußsensor einlegen und auf den Drucksensor drücken (grün blinkende Leuchte bestätigt Aktivierung des Pairing-Modus). Unteren Stimulator in Pairing-Modus versetzen.

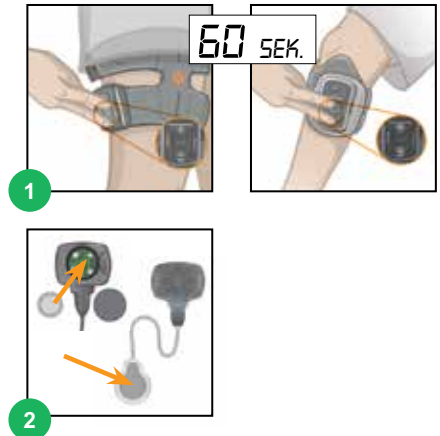

Pairing des Systems mit der Bioness-Spezialisten-App

- 1 Bei der Bioness-Spezialisten-App anmelden.
- 2  zum Aufrufen des Verbindungs-Bildschirms auswählen. System durch gleichzeitiges Drücken der Plus- und der Minustaste auf dem Stimulator in den Pairing-Modus versetzen.  Verbindungs-Symbol über dem gewünschten Bein auswählen. Nach erfolgreichem Pairing Verbindungs-Bildschirm durch Drücken auf  verlassen.

- 3 Patienten auswählen, d. h. mit vorhandenem Patienten arbeiten, neuen anlegen oder aus der Liste auswählen.

Bei Auswahl aus der Patientenliste auf das  Upload-Symbol drücken oder auf den ausgewählten Namen doppeltippen.



Anpassen des L300 Go-Systems

- 1 Persönliche Einlage befestigen.
- 2 Persönlichen Gurtbezug über den Manschettengurt schieben.
- 3 Stimulationsbereich mit feuchtem, weichem Tuch abwischen. Unterschenkel leicht ausstrecken.
- 4 Elektrode(n) an der L300 Go-Manschette befestigen und Manschette dann mithilfe der Patella-Positionierungshilfe auf dem Bein platzieren, Gurt schließen und festziehen.
- 5 Stimulationseinstellungen zur Erzielung der gewünschten Reaktion programmieren.



Die vollständigen Kontraindikationen, Warnhinweise, Nebenwirkungen, Vorsichtsmaßnahmen und Pflegeanweisungen sind im Anwenderhandbuch aufgeführt.

L300 Go®, Bioness, das Bioness-Logo® und LiveOn® sind Marken der Bioness Inc in den USA oder anderen Ländern. | www.bioness.com

Anpassen des L300 Go Thigh Stand-Alone

- 1 Oberschenkel-Gewebeelektroden befeuchten und an der Manschette befestigen.
- 2 Stimulationsbereich mit feuchtem, weichem Tuch abwischen. Manschette mind. drei Fingerbreiten proximal der Fossa poplitea (ischiocrurale Muskulatur) oder Patella (Quadrizeps) auf dem Oberschenkel platzieren.
- 3 Manschette auf der Mittellinie des Oberschenkels zentrieren. Befestigungsgurte schließen.
- 4 Stimulationseinstellungen programmieren, während der Patient sitzt, um die gewünschte Reaktion zu erzielen.
- 5 Ggf. die Stimulationseinstellungen anpassen, während der Patient steht.



Programmierung des L300 Go-Systems

- 1 **Stimulationseinstellungen programmieren.** Gewünschten Stimulator im **Stimulationssteuerungs-Dashboard** auswählen. Elektrodentyp auswählen (Steering-Elektroden-Bildschirm abgebildet). Bei sitzendem Patienten **Test** drücken, um die Stimulation für den ausgewählten Stimulator einzuschalten. Einstellungen zur Erzielung der gewünschten Reaktion anpassen. Auf **Test** drücken, um die Stimulation zu beenden. Diesen Schritt für alle verbundenen Stimulatoren wiederholen.
- 2 **Gangeinstellungen programmieren.** Auf das **Gang-Bildschirm-Symbol** drücken. Zur Aktivierung des Gang-Modus auf das **Stimulations-Symbol** drücken. Patienten beim Gehen beobachten und ggf. die Einstellungen anpassen. Zum Beenden der Stimulation auf das **Stimulations-Symbol** drücken.
- 3 **Trainingseinstellungen programmieren.** Auf das **Trainings-Bildschirm-Symbol** drücken. Trainingseinstellungen anpassen (ggf. auch bestimmten Stimulator ausschließen). Auf das **Trainings-Symbol** drücken, um die Stimulation auf allen gepairten Geräten einzuschalten, die in den Trainings-Modus eingeschlossen sind. Auf das **Trainings-Symbol** drücken, um die Stimulation zu beenden.
- 4 Am Ende jeder Sitzung die Verbindung des Systems trennen, indem Sie zum **Verbindungs-Bildschirm** navigieren und auf das **Verbindungstrennungs-Symbol** drücken. Spezialisten-App beenden.
Hinweis: Das Symbol für manuelle Stimulation drücken und halten, um die Stimulation auf allen gepairten und aktiven Stimulatoren zu aktivieren (Stimulation bleibt so lange aktiv, wie die Schaltfläche gedrückt gehalten wird).

