


إقران المكونات

مهم: قم بإقران مكونات النظام قبل الإقران بتطبيق المعالج

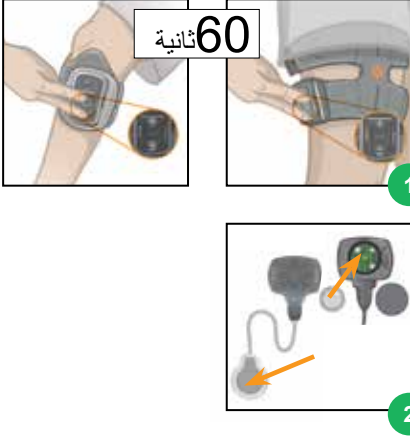

1

2

1

سوار الفخذ مع السوار السفلي.

تفعيل وضع الإقتران بمولد النبض الخارجي: اضغط بصورة متزامنة على زر "+" و "-" في كل مولد نبض خارجي. سيومض مؤشر حالة مولد النبض الخارجي باللون الأخضر، والأصفر، والأحمر.

2

عند الحاجة، قم بإقران جهاز استشعار القدم بمولد النبض الخارجي الخاص بأسفل الساق. **تفعيل وضع الإقران بجهاز استشعار القدم:** قم بإقران جهاز استشعار القدم لمولد نبض خارجي جديد من خلال استبدال بطارية (CR2032) الموجودة في جهاز استشعار القدم والضغط على مستشعر الضغط، سيومض الضوء الأخضر لتأكيد تفعيل وضع الإقران. ضع مولد النبض الخارجي السفلي في وضع الإقران.

إقران النظام بتطبيق مبرمج المعالج من Bioness

سجل الدخول إلى تطبيق مبرمج المعالج من Bioness



1

2

3

1

2

اختر للوصول إلى شاشة الاتصال. اضبط النظام على وضع الإقران عن طريق الضغط على زر علامة الجمع و علامة الطرح الموجودين في مولد النبض الخارجي في آن واحد. اختر أيقونة الاتصال فوق الساق المرغوبة. بمجرد الإقتران، أغلق شاشة الاتصال من خلال النقر فوق .

3

اختر مريضاً على سبيل المثال: العمل مع مريض حالي، أو إنشاء ملف جديد أو الاختيار من القائمة.

في حال الاختيار من قائمة المرضى، اضغط على أيقونة التحميل أو انقر نقراً مزدوجاً على الاسم الذي تم اختياره.

تركيب نظام L300 Go

وصل اللوحة الشخصية.

مرّر غطاء الحزام الشخصي فوق حزام السوار.

امسح منطقة التحفيز بقطعة قماش مبللة وناعمة. ثم مدد الساق السفلية بشكل ضئيل.

بمجرد توصيل الأقطاب الكهربائية بسوار L300، ضع السوار على الساق باستخدام محدد موقع رضفة السوار، ثم آمن الحزام، واضبط الكثافة.

قم ببرمجة إعدادات التحفيز للوصول إلى الاستجابة المطلوبة.



1

2

3

4

5

للحصول على قائمة كاملة بكل التعارضات والتحذيرات وردود الأفعال العكسية والاحتياطات وإرشادات العناية، الرجاء الاطلاع على دليل المستخدم.

- 1 بلل الأقطاب الكهربائية القماشية للفخذ ثم ضعها على السوار.
- 2 امسح منطقة التحفيز بقطعة قماش مبللة وناعمة. ضع السوار على الفخذ، على مسافة لا تقل عن ثلاث أصابع من الحفرة المأبضية (للاستخدام في العضلة المأبضية) أو الرضفة (للاستخدام في العضلة رباعية الرؤوس).
- 3 ثبت السوار على خط المنتصف بالفخذ. أحكم ربط الأحزمة.
- 4 قم ببرمجة إعدادات التحفيز أثناء جلوس المريض حتى الوصول إلى الاستجابة المطلوبة.
- 5 في حال الضرورة، اضبط إعدادات التحفيز أثناء وقوف المريض.



برمجة نظام L300 Go

- 1 **برمجة إعدادات التحفيز.** اختر مولد النبض الخارجي المرغوب به من لوحة متابعة التحفيز. اختر نوع القطب الكهربائي (شاشة أقطاب التوجيه الموضحة في الصورة). أثناء جلوس المريض، اضغط على **اختبار** اختبار لتشغيل التحفيز في مولد النبض الخارجي المحدد. اضبط الإعدادات للوصول إلى الاستجابة المرغوب بها. اضغط على **اختبار** اختبار لإيقاف التحفيز. كرر الخطوة لجميع مولدات النبض الخارجية المتصلة.
- 2 **برمجة إعدادات المشي.** اضغط على أيقونة شاشة المشي. اضغط على **أيقونة موجات التحفيز** لتمكين وضع المشي. راقب مشي المريض واضبط الإعدادات حسب الحاجة. اضغط على **أيقونة موجات التحفيز** لإيقاف التحفيز.
- 3 **برمجة إعدادات التدريب.** اضغط على **أيقونة شاشة التدريب**. اضغط على إعدادات التدريب. اضغط على **أيقونة موجات التحفيز** لإيقاف التحفيز.
- 4 في نهاية كل جلسة، افصل النظام من خلال الانتقال إلى **شاشة الاتصال والضغط** على **أيقونة إلغاء الاتصال**. سجل الخروج من تطبيق المعالج.

ملاحظة: اضغط مع الاستمرار على **أيقونة التحفيز اليدوي** لتنشيط التحفيز في جميع مولدات النبض الخارجية (EPG) النشطة والمقترنة أثناء الضغط على الزر.

