


Parowanie elementów

WAŻNE: Parowanie elementów systemu należy przeprowadzić przed sparowaniem z aplikacją dla lekarza.

- 1 Parowanie mankietu na udo z mankietem na goleń.
Włączanie trybu parowania generatora EPG: Jednocześnie nacisnąć przyciski plus i minus na każdym generatorze EPG. Wskaźnik stanu na generatorze EPG zamiga na zielono, żółto i czerwono.
- 2 W razie potrzeby sparować czujnik na stopę z generatorem EPG w mankiecie na goleń.
Włączanie trybu parowania czujnika na stopę: Sparować czujnik na stopę z nowym generatorem EPG, umieszczając w czujniku na stopę baterię (CR2032) i naciskając czujnik nacisku. Zacznie migać zielony wskaźnik, co potwierdza aktywację trybu parowania. Włączyć tryb parowania generatora EPG w mankiecie na goleń.

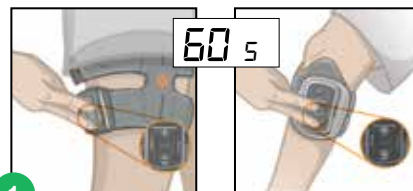

Parowanie systemu z aplikacją Bioness programatora dla lekarza

- 1 Zalogować się w aplikacji Bioness programatora dla lekarza
- 2 Wybrać przycisk , aby uzyskać dostęp do ekranu parowania. Włączyć w systemie tryb parowania, naciskając jednocześnie przyciski plus i minus na generatorze EPG. Wybrać **ikonę parowania**  nad odpowiednią nogą. Po sparowaniu wyjść z ekranu, klikając .
- 3 Wybrać pacjenta, klikając jedną z *następujących opcji: Praca z istniejącym pacjentem, Utwórz nowe lub Wybierz z listy*.
W przypadku wyboru z listy pacjentów nacisnąć **ikonę przesyłania**  lub dwukrotnie kliknąć wybrane imię i nazwisko.



Dopasowywanie systemu L300 Go


- 1 Przymocować panel personalizacji.
- 2 Przeciągnąć pasek panelu personalizacji nad paskiem mankietu.
- 3 Przetrzeć obszar stymulacji za pomocą miękkiej, zwilżonej ściereczki. Poprosić pacjenta o lekkie wysunięcie голени do przodu.
- 4 Po przymocowaniu elektrod(y) do mankietu L300 założyć mankiety na nogę pacjenta, używając lokalizatora rzepki na mankiecie, zabezpieczyć go paskiem i dostosować napięcie.
- 5 Zaprogramować ustawienia stymulacji w celu osiągnięcia żądanej odpowiedzi u pacjenta.



Pełna lista wszystkich przeciwwskazań, ostrzeżeń, reakcji niepożądanych, środków ostrożności i instrukcji dotyczących pielęgnacji znajduje się w Podręczniku użytkownika.

Dopasowywanie samodzielnej jednostki na udo L300 Go

- 1 Zmoczyć elektrody tekstylne na udo i zatrzasknąć je w mankiecie.
- 2 Przetrzeć obszar stymulacji za pomocą miękkiej, zwilżonej ściereczki. Założyć mankiet na udo pacjenta, na wysokości nie niższej niż proksymalna odległość trzech złożonych palców od dołu podkolanowego (umiejscowienie na mięśniach udowych tylnych) lub rzepki (umiejscowienie na mięśniu czworogłowym).
- 3 Wyśrodkować mankiet względem linii środkowej uda. Zapiąć paski.
- 4 Zaprogramować ustawienia stymulacji w celu osiągnięcia żądanej odpowiedzi u pacjenta w pozycji siedzącej.
- 5 W razie potrzeby dostosować ustawienia stymulacji u pacjenta w pozycji stojącej.

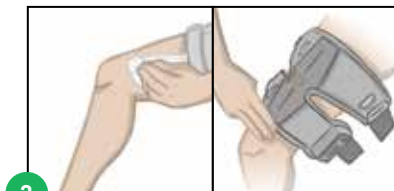

Programowanie systemu L300 Go

- 1  **Zaprogramować ustawienia stymulacji.** Wybrać żądany generator EPG w obszarze **panelu sterowania stymulacją**. Wybrać typ elektrody (na rysunku przedstawiono ekran elektrody sterującej). Po zajęciu przez pacjenta pozycji siedzącej nacisnąć przycisk **Test** , aby włączyć stymulację w wybranym generatorze EPG. Dostosować ustawienia w celu osiągnięcia żądanej odpowiedzi u pacjenta. Nacisnąć przycisk **Test** , aby zatrzymać stymulację. Powtórzyć czynność dla wszystkich podłączonych generatorów EPG.
- 2  **Zaprogramować ustawienia chodu.** Nacisnąć **ikonę ekranu chodu**. Nacisnąć **ikonę impulsu stymulacyjnego** , aby włączyć tryb chodu. Obserwować chód pacjenta i dostosować ustawienia według potrzeb. Nacisnąć **ikonę impulsu stymulacyjnego** , aby zatrzymać stymulację.
- 3  **Zaprogramować ustawienia ćwiczeń.** Nacisnąć **ikonę ekranu ćwiczeń** , aby włączyć tryb ćwiczeń. Dostosować ustawienia ćwiczeń, w tym opcję wykluczenia danego generatora EPG, jeśli jest to wymagane. Nacisnąć **ikonę ćwiczeń**, aby włączyć stymulację we wszystkich sparowanych urządzeniach, które zostały uwzględnione w ustawieniach trybu ćwiczeń. Nacisnąć **ikonę ćwiczeń** , aby zatrzymać stymulację.
- 4 Po zakończeniu każdej sesji rozłączyć sparowane elementy systemu, przechodząc do ekranu parowania  i naciskając **ikonę rozłączania** . Zamknąć aplikację dla lekarza.

Uwaga: Nacisnąć i przytrzymać ikonę stymulacji ręcznej , aby aktywować stymulację we wszystkich sparowanych i aktywnych generatorach EPG na czas wciśnięcia przycisku.



Bioness Inc.
25103 Rye Canyon Loop
Valencia, CA 91355, Stany Zjednoczone
Nr telefonu: +1 800 211 9136
Adres e-mail: info@bioness.com
Strona internetowa: www.bioness.com



bioness®

A Bioventus Rehab Company

612-01041-001 Rev. D 12/2022